

VIANDOpflege®



HEALTH CARE
Made in Germany



Ein Mehr an Möglichkeiten

	Konzept	Seite 5		
	Aktivieren und Mobilität erhalten	Seite 6 – 7		
		Seite 8 – 9	Pflegeoptimierung	
	Funktionen	Seite 10 – 11		
		Seite 12 – 19	Ausstattung und Zubehör	
	Hygiene	Seite 20 – 21		
		Seite 22 – 23	Bezugsmaterialien und Farbauswahl	
	Brandschutz	Seite 24 – 25		
		Seite 26 – 27	Qualität	
	Maße	Seite 28 – 29		
		Seite 30 – 31	Lieferung und Service	
	Ökologie	Seite 32 – 33		
		Seite 34 – 35	Warum, wer, wo?	

VIANDOpflege®

„Eine Produktvielfalt ist nicht gefordert, sondern ein Produkt mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.“

Das gesamte Spektrum des Healthcare-Sitzens in nur einem Sessel vereint, eine Vielzahl an Modell-Varianten überflüssig.

Beschaffungsplanung, Einsatz, Bedienung und Service sind auf einen Nenner gebracht. Sämtliche Zubehörteile passen auf jeden VIANDOpflege®-Sessel, sind schnell untereinander austauschbar bei gleichzeitiger Individualisierung des Sessels für diverse Personen und Krankheitsbilder. Er passt! Von Geburtsklinik bis Geriatrie, von Pflegegrad I bis 5, für jedes Alter und alle Körpergrößen.

Einer für alle und alles in einem.

VIANDOpflege® ist Made in Germany und eine eingetragene Marke der KRANICHconcept GmbH.

Quick Facts

- diverse Modell-Varianten überflüssig
- Höchstmaß an Flexibilität jederzeit
- einfache, einheitliche Bedienung
- komplettes Zubehör untereinander austauschbar
- individualisierbar für diverse Krankheitsbilder
- passend von Pflegegrad I – 5
- für jedes Alter, für alle Körpergrößen
- einheitliche Beschaffung, Logistik und Service

One fits all

VIANDOpflege®

Aktivieren und Mobilität erhalten





Niemand, der sein Leben eigenständig geführt hat, gibt diese Unabhängigkeit leichten Herzens auf. Ganz gleich in welchem Alter, ob temporär oder dauerhaft. VIANDOpflege® unterstützt und fördert in jedem Stadium die verbliebenen eigenen Fähigkeiten. Patienten bewahren ihr persönliches Höchstmaß an Selbstständigkeit und werden so für den Heilungsprozess aktiv motiviert.

Selbstständigkeit erhalten

Mit dem VIANDOpflege® können auf Pflege angewiesene Menschen ihr Leben per Tastendruck ein komfortables Stück weit selbst in die Hand nehmen. Sein bedienfreundlicher Motor bringt Rückenlehne und Beinauflage stufenlos in die gewünschte Sitz- oder Liegeposition und bietet effektive Aufstehhilfe mit sicherem Rückhalt. Ohne Klingeln und Warten. Jederzeit und immer wieder.

Teilhabe am sozialen Leben

Der VIANDOpflege® macht seine Nutzer mobil. Sie rollen zu Mahlzeiten und Gemeinschaftsaktivitäten im Sessel mühelos vor Ort, statt erst in einen Rollstuhl umgesetzt zu werden. Beste Voraussetzungen für aktive Teilhabe am sozialen Leben und persönliche Zuwendung durch zeitlich und körperlich entlastete Pflegekräfte.

Pflege mit Würde

Ein schönes Möbel liefert den perfekten Rahmen für einen würdevollen Auftritt. Es stärkt das Selbstbewusstsein aller an der Pflege Beteiligten und ebnet Patienten den Weg zur unbefangenen Teilnahme an der Gemeinschaft. Dieses Gefühl von Normalität wirkt sich messbar positiv auf Pflegealltag und Heilungsprozess aus.

Quick Facts

- Erhalt von Selbstständigkeit
- Förderung eigener Fähigkeiten
- Steigerung der Mobilität
- Teilhabe am sozialen Leben
- Wahrung der Würde
- Optimierung von Heilungsprozessen

Zusammen das Richtige tun

VIANDOpflege®

Pflegeoptimierung





Mit VIANDOpflege® stellen Sie die ideale Verstärkung für Ihr Pflorgeteam ein. Obwohl er nicht auf der Gehaltsliste steht, übernimmt der neue Mitarbeiter eine tragende Rolle, ist überaus belastbar, rund um die Uhr einsatzbereit und dabei hochqualifiziert. Ob Sitzen, Liegen oder Aufstehen, Wechsel in Bett, Bad oder einen anderen Raum, mit Hilfestellung nach Maß erspart VIANDOpflege® Zeit und Kosten und dem Pflorgeteam vielfältige körperliche Belastungen.

Unter dem Motto „Ent- statt Belastung“ erleichtert sein innovatives Stecksystem durch das temporäre Entfernen einzelner Module den Zugang zum Patienten und damit ein ergonomisches Arbeiten. Durch die motorische Aufstieghilfe lässt sich der kräftezehrende menschliche Einsatz genauso effektiv reduzieren wie durch die Rollstuhlfunktion, die Pflegekräften wie Patienten die körperliche Anstrengung beim Umsetzen in einen Rollstuhl erspart. Und wer nicht von der Patientenklänge zu jedem Umsetzen, Positionieren, Aufstehen oder anderen Handreichungen herbeigerufen wird, gewinnt Freiräume für persönliche Zuwendung. Kurz: für alle ein Gewinn.

Quick Facts

- ergonomisches Arbeiten
- körperliche Entlastung
- Zeitersparnis
- Motivationssteigerung
- Optimierung des Pflegealltags

Für alle ein Gewinn

VIANDOpflege®

Funktionen





Die Unterstützung, die Menschen in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen und -stadien benötigen, variiert. Darauf stellt sich VIANDOpflege® je nach Einsatzort und Anforderungen ein – mit einer Bandbreite an Funktionen, die von manueller bis motorischer Verstellbarkeit reicht. Unter der Devise „So viel Komfort wie möglich und so viel Hilfe wie nötig“, fördert und unterstützt er noch vorhandene Aktivität und liefert bei Mobilitätsverlust optimale Substitution.

Rollstuhlfunktion

Gummierte Bodenrollen, ein handlicher Schiebebügel und eine ausklappbare Fußauflage verleihen dem Sessel leichtgängige Mobilität. Patienten können komfortabel fortbewegt werden, wobei die geschwächte Rumpfmuskulatur anders als im Rollstuhl ergonomisch gestützt und ein Zusammensinken verhindert wird.

Motorische Verstellbarkeit

Ein ruhiger, vibrationsarmer Motor übernimmt die separate und stufenlose Verstellung von Beinauflage und Rückenlehne. Die Sesselelemente können punktgenau positioniert werden bis hin zur **Liegefläche** in Herz-Waage-Lage. Eine Beinauflage in Maximallänge entlastet die Venen und sorgt für optimale Regeneration der Beine wie des gesamten Körpers.

Als **Aufstehhilfe** hebt der Motor den Sessel mit leichter Neigung nach vorn an. Der Patient kann die Beine unter den Körperschwerpunkt bringen und mit sicherem Rückhalt aufstehen. Umgekehrt wird er zum kräfteschonenden Hinsetzen in stehender Position abgeholt und sanft abgesenkt.

Ein leistungsstarker Akku macht die motorische Variante des VIANDOpflege® standortunabhängig einsetzbar.



Quick Facts

- ergonomisch sitzen und entspannen
- schonend liegen und regenerieren
- sicher aufstehen und hinsetzen
- Kreislauf stabilisieren
- therapieren und pflegen
- Aktivität erhalten
- Heilungsprozess fördern

Für Patienten viel bewegen

VIANDOpflege®

Ausstattung und Zubehör

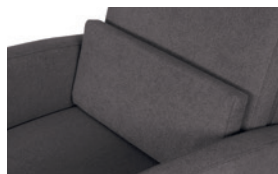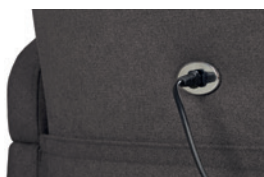



VIANDOPflege® ist in seiner Multifunktionalität einzigartig. Mit verschiedenen Ausstattungs-Varianten und umfangreichem Zubehör passt er sich den diversen Aufgaben im Tageslauf genauso flexibel an, wie den speziellen Anforderungen ganz unterschiedlicher Krankheitsbilder.

Stütz- und Therapiekissen

Ob es gilt, die Rumpfmuskulatur zu stabilisieren, Lordose-, Nacken- oder Kniebereich zu entlasten oder die Rücken-Unterstützungsfläche zu erweitern – unsere speziell entwickelten Stütz- und Therapiekissen sorgen für optimalen Halt, Stabilität und Entlastung bei geschwächter Muskulatur. In fünf verschiedenen Varianten sind sie maßgeschneidert für jeden Einsatzzweck.

Taschen, Halter, Utensilios

Eine Vielzahl kluger Extras hält für Patienten alles in Reichweite und ermöglicht so den eigenständigen Zugriff auf Getränke, Medien oder Gehhilfen. Utensilien-Taschen, Therapie-Tisch, USB-Anschluss und Halterungen für Gehhilfen oder Infusionsständer machen VIANDOPflege® zum persönlichen Butler, der alles Gewünschte zur Hand hat.

Von XS bis XXL

Damit Nutzer mit unterschiedlicher Größe und Statur optimale Unterstützung erhalten, kommt ihnen VIANDOPflege® in jeder Hinsicht entgegen, mit Kopfstützen im Steckprinzip, höhenverstellbaren Nackenkissen, Armlehnen-Erhöhen oder aber der längsten auf dem Markt befindlichen Beinauflage. Darüber hinaus ist er bis 133 kg Gewicht belastbar und motorisch voll einsatzfähig.

Quick Facts

- seitliche Kopfstützen
- Funktions- und Stützkissen
- Therapie-Tisch
- Utensilien-Taschen
- Utensilien-Halter
- Halterung für Infusionsständer und Gehhilfen
- Armlehnen-Erhöhen
- USB-Anschluss



Ganz individuell

Ausstattung wählen

Individuelles Zubehör

Besondere Eigenschaften

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wählbaren Ausstattung sowie das erhältliche Zubehör für grundlegende Pflegeunterstützung, die den VIANDOPflege®-Sessel auszeichnet.

Diese Ausstattungen stehen zur Auswahl




VIANDOPflege® mit motorischer Verstellbarkeit

In dieser Ausstattungsvariante lassen sich Beinauflage und Rückenlehne von einem ruhig und vibrationsarm arbeitenden Motor stufenlos und getrennt voneinander verstellen. Millimetergenau sind die Sesselemente in Position zu bringen, der tiefste Punkt entspricht der Herz-Waage-Lage (0-Lage).




VIANDOPflege® mit Aufstehhilfe und motorischer Verstellbarkeit

Mit der motorischen Aufstehhilfe wird dank vibrationsarm arbeitenden Motor der Sessel stufenlos und mit leichter Neigung nach vorn angehoben. So gelangen Füße und Knie unter den Körperschwerpunkt, müheloses Aufstehen wird ermöglicht. Umgekehrt wird zum kräfteschonenden Hinsetzen der Nutzer in stehender Position abgeholt und sanft mit dem Sessel abgesenkt.

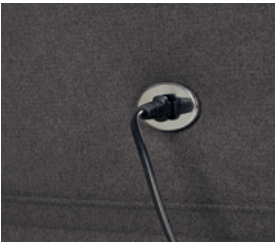

Akku

Der Akku ermöglicht einen kabellosen Betrieb der motorischen Verstellbarkeit und Aufstehhilfe. Ohne störendes Kabel entfallen Stolperfallen, und die motorgetriebenen Funktionen sind an jedem Ort nutzbar.

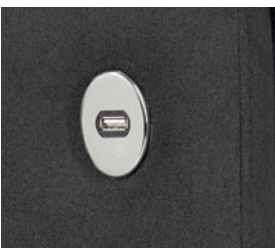

USB Anschluss

Der USB-Anschluss versorgt technische Geräte mit der nötigen Energie. So können Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte auch ohne Steckdose in Reichweite geladen und benutzt werden. Er befindet sich an der äußeren, von vorn gesehen linken Seite der Armlehnen-Wange und ist bequem im Sitzen zu erreichen (nur erhältlich für die Modelle mit motorischer Ausstattung).



Armauflage in Sichtholz

Ein optisches Detail und eine Alternative zu den gepolsterten Armlehnen. Die Armauflage ist aus massivem Buchenholz gefertigt und wird stabil und untrennbar mit der Armlehne verbunden.



Vorrüstung für Infusionsständer-Halterung mit Abdeckkappen

Die Vorrüstung für eine spätere Montage der Halterung für einen Infusionsständer wird an der hinteren rechten Armlehnen-Wange montiert. Durch Abdeckkappen sind die Bohrungen kaschiert. So ist VIANDOPflege® bereits gerüstet, wenn zu späterem Zeitpunkt ein Infusionsständer benötigt wird.

Zubehör – zur individuellen Konfiguration



Kopfstütze für die Positionierung (Stecksystem)

Für die seitliche Positionierung des Kopfes. Ein Wegknicken des Kopfes wird so verhindert. Gleichzeitig vermittelt die Kopfstütze ein Gefühl von Geborgenheit. Sie kann zu therapeutischen Zwecken dank des Stecksystems leicht entfernt werden.



Armlehnen-Erhöhung

Mithilfe der Armlehnen-Erhöhlungen lässt sich der VIANDOpflege® individuell an die Körpergröße anpassen. Das Set besteht aus Erhöhungen mit 2 cm und 3 cm. So können die Armlehnen um bis zu 5 cm erhöht werden.



Therapie-Tisch

Der Therapie-Tisch aus transparentem Polycarbonat erlaubt anregende Tätigkeiten wie Spielen und Lesen. Natürlich ist er auch geeignet, um eine Mahlzeit einzunehmen. Schnell aufsteckbar und optisch leicht durch transparentes Material hat der Nutzer nicht das Gefühl, fixiert zu sein.



Multifunktion-Keilkissen

Das Multifunktion-Keilkissen dient nicht nur zierlichen Personen zur Verringerungen der Sitztiefe. Auch andere Nutzer profitieren von der Optimierung der Unterstützungsfläche am Rücken und als Abpolsterung unter den Knien. Nicht zuletzt hilft es beim aufrechteren Sitzen.



Funktionskissen

Vielfältig einsetzbar zur Lordose-Unterstützung, im Nackenbereich, als Abpolsterung unter den Knien oder wo sonst zusätzliche Unterstützungsfläche gebraucht wird.



Stützkissen 2er Set

Die seitlichen Stützkissen werden zwischen Becken und Armlehne verwendet und dienen der seitlichen Positionierung und Stütze. Die Rumpfmuskulatur wird so stabilisiert.



Kopfstütz-Kissen für das Kopfteil

Für mehr Stabilität und ein intensiveres Gefühl von Geborgenheit ist das Kopfstütz-Kissen ein ideales Zubehör. Durch ein sinnvolles Gegengewicht ist es an beliebiger Stelle der Rückenlehne positionierbar.



Nackenkissen für das Kopfteil

Durch ein Gegengewicht an beliebiger Stelle der Rückenlehne positionierbar. Es kommt dort zum Einsatz, wo es gebraucht wird.



Halterung für Utensilien

Alles an einem Platz und ohne Bücken zu erreichen. Ob als Ablage für ein Getränk, Fernbedienung, Telefon/Handy oder eine Brille. Die Utensilien-Halterung wird auf die gepolsterten Armlehnen aufgesteckt und bewahrt alles sicher und schnell zu Hand.



Grosse Utensilien-Tasche

Immer alles dabei und doch dezent verpackt. Die große Tasche im selben Bezugsmaterial gefertigt, wie der Sessel selbst, dient der Aufbewahrung von Zubehör und Kissen. Die Tasche wird an der Rückseite des Sessels befestigt. So ist alles stets in Griffweite und schnell einsetzbar.



Seitliche Utensilien-Tasche

Klein und unauffällig in selben Bezugsmaterial wie der Sessel gearbeitet, bewahrt die seitliche Tasche persönlichen Dinge wie Zeitschriften, Brille oder Fernbedienungen auf. Alles ist rasch zu Hand.



Halterung für den Infusionsständer

Gefertigt aus Edelstahl, kann die Halterung für den Infusionsständer bei entsprechender Vorrichtung an der Rückseite der rechten Armlehnen-Wange montiert werden.



Infusionsständer aus Edelstahl

Er wird in die Halterung gesteckt und durch Drehen auf einem Gewinde fixiert. So ist er fest mit dem Sessel verbunden. Kein zusätzliches Gerät ist im Weg, keine Stolpergefahr und mehr Mobilität. Der Infusionsständer ist höhenverstellbar und aus hochwertigem, reinigungs- und desinfektionsfreundlichem Edelstahl.



Halterung für Gehhilfen

Die Halterung für Gehhilfen wird an den optionalen Infusionsständer geklemmt. So finden die Gehhilfen ihren Platz, sind weder im Weg noch stellen sie eine Stolperfalle dar. Sie sind einfach stets griffbereit.

Einzigartig – die besonderen Eigenschaften



In Zusammenarbeit mit...

Die besondere Funktionalität, Ergonomie und die aktivierenden Eigenschaften des VIANDOpflege® entstanden in der inspirierenden Zusammenarbeit mit den Pflegeexperten der DGATP (Deutsche Fachgesellschaft für Aktivierend-therapeutische Pflege e.V.) und den Hamburger Pflegeinstruktoren der BIKA® e.V..



Extra-lange Beinauflage

Der VIANDOpflege® verfügt über die längste Beinauflage am Markt. Die Beine und Füße liegen auf, die Venen werden entlastet und können regenerieren.



Geringes Sitzgefälle – aktiviert die Muskulatur

Das geringe Sitzgefälle von VIANDOpflege® erleichtert auch ohne Motor das Aufstehen. Geschwächte Muskulatur wird durch kleinste Bewegungen aktiviert und mobilisiert. Langes Sitzen ist so weniger ermüdend, und körperliches Zusammensacken wird vermieden.



Mobilität durch Rollen

Nutzen Sie VIANDOpflege® dort, wo er gebraucht wird. Kraftraubende Positionswechsel entfallen. Ob zu Tisch, an den Treppenlift, zum Bett oder im Bad, dank der optimierten Maße sind enge Winkel und schmale Durchfahrten kein Problem. Wenn nötig, dreht der Sessel auf dem Punkt.



Innovatives Stecksystem

Das von Pflegeexperten bevorzugte Stecksystem erleichtert Pflegeanwendungen und Positionswechsel. Die Armlehnen und die Kopfstütze lassen sich unkompliziert und vollständig entfernen. Beim robusten und wartungsfreien Stecksystem von VIANDOpflege® ist nichts im Weg, was den Bewegungsradius einschränken könnte.



Kopfteil höhenverstellbar und abnehmbar

Individuelle Unterstützungsfläche für große Persönlichkeiten. Das Kopfteil ist millimetergenau auf die Größe der sitzenden Person anpassbar. Und dank des VIANDOpflege® Stecksystems es ist vollständig zu entfernen, wenn therapeutische und pflegerische Anwendungen einen ungehinderten Zugang zum Kopf und Nacken erfordern.



Fußteil ausklappbar

Sicheres und kräfteschonendes Positionieren der Füße. Beim Rollstuhl sind sie Standard, nicht aber bei rollbaren Pflegesesseln. Beim VIANDOpflege® sind dank des Fußteils die Beine und Füße optimal platziert, wenn die mobile Rollstuhlfunktion genutzt wird.



Schiebebügel

Ergonomisch geformt und aus massivem Buchenholz gefertigt. Der VIANDOpflege® lässt sich mithilfe des Schiebebügels mühelos bewegen und manövrieren.



Leise Motoren und ruhige, vibrationsarme Mechanik

Viele Krankheitsbilder gehen häufig mit Ängsten einher; daher ist der Einsatz von Technik notwendig, die Stabilität und Ruhe vermittelt. Die im VIANDOpflege® verbaute Technik ist stets auf dem neusten Stand und bewährt sich in Geriatrischen Kliniken, Onkologien, Tagespflegeeinrichtungen und in der privaten Pflege. Made in Germany – Qualität, die sich auszahlt.



Fußteil auch in der Ruhe- und Liegeposition aufklappbar

Waden- oder Fußkrämpfe werden durch Dehnung der Unterschenkelmuskulatur gelindert. Diese Möglichkeit bietet das aufgeklappte Fußteil in der Ruhe- und Liegeposition. Die Füße können gegen den Widerstand des Fußteils gedrückt und somit die Muskulatur gedehnt werden.



Sitzkissen ist herausnehmbar, der Bezug abnehmbar

Um den Sessel reinigen zu können, kann das Sitzkissen einfach entnommen werden. Der Bezug des Sitzkissens ist abnehmbar und lässt sich problemlos reinigen. Zusätzlich sorgt eine Membran dafür, dass nichts in die Polsterung eindringen kann.



Herz-Waage Position / 0-Lage

Positionierung der Füße leicht erhöht über dem Becken. Dieser durch Pflegeexperten optimierte Winkel der Beinauflage macht den Unterschied. So entlasten Sie die Venen, das Herz und der Kreislauf werden geschont.



Armlehnen sind vielfach nutzbar

Das innovative Steckprinzip erlaubt ein Umstecken der Armlehnen. Die flachere, hintere Seite der Armlehnen lässt sich mühelos nach vorne umsetzen. So ist z.B. das „Unterfahren“ eines flacheren Tisches problemlos möglich.



Armlehnen gepolstert mit festem Kern

Eine Erkenntnis aus der aktivierend-therapeutischen Pflege. Die Armlehnen müssen Halt geben, dürfen aber nicht zu fest und glatt sein. Vielmehr ist eine weiche und anschmiegsame Unterstützungsfläche der Arme wichtig, um Irritationen der Haut und der Gefäße zu vermeiden. Beim Aufstehen oder Abstützen wiederum ist eine stabile und feste Unterstützungsfläche unerlässlich, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.



Gerundete Armlehnen

Ergonomisch und durchdacht sind die nach hinten gerundeten Armlehnen. In jeder Position der verstellbaren Rückenlehne werden auf diese Weise die Arme gehalten und gestützt. Das irritierende Gefühl, dass die Unterarme wegrutschen und keinen Halt haben, kann nicht aufkommen.



Bezugsmaterialien sind zertifiziert

Die von uns verarbeiteten Bezugsmaterialien sind für das Gesundheitswesen entwickelt und zertifiziert. Die hohen Anforderungen an Hygiene und Brandschutz im Krankenhausbetrieb werden nachweislich erfüllt. Zudem sind die Bezugsmaterialien auf alle gängigen Desinfektionsmittel getestet. Eine entsprechende Liste der getesteten Desinfektionsmittel stellen wir gerne zur Verfügung.



Große Auswahl an Bezugsmaterialien

Wir bieten eine große Auswahl an Bezugsmaterialien und Farben in den jeweiligen Qualitäten an. Die Textilien DELIUS DELIGARD Tiba und Fellini werden dabei überwiegend in der Tagespflege und im privaten Umfeld eingesetzt. Sie sind besonders pflegeleicht und wirken einem Wärmestau entgegen. Das Kunstleder skai Parotega NF ist das bevorzugte Material im Klinikeinsatz. Es lässt sich besonders leicht reinigen und desinfizieren.



Nutzerfreundliche Fernbedienung

Pflegeexperten raten zu nachvollziehbaren Funktionen und einfacher, intuitiver Bedienbarkeit bei Hilfsmitteln. Der VIANDOpflege® verfügt daher über eine leicht zu betätigende Fernbedienung mit sechs großen und schnell nachgebenden Tasten. Weniger ist manchmal mehr.



Optimierte Maße

Es wurde an alles gedacht. Breite, Tiefe und die Höhe der Armlehnen. So passt der Pflegesessel in jeden Raum, durch fast jede Tür, unter den Tisch, dreht auf engstem Raum und ist sehr wendig.

Bitte beachten Sie, dass im Polstermöbelbereich produktionsbedingte Maßabweichungen von +/- 2 cm möglich sind. Diese Abweichungen liegen innerhalb der branchenüblichen Toleranzen und stellen keinen Mangel dar.



Schäume in schwerentflammbarer Qualität erhältlich

In öffentlichen Räumen, Fluren und Fluchtwegen sind Brandschutzbestimmungen zu beachten. Sprechen Sie uns gern an. Wir können Ihre Wünsche hinsichtlich Brandschutz erfüllen.



Fernbedienung dort, wo Sie sie brauchen

Die Fernbedienung des Sessels ist mitsamt ihrem Anschlusskabel standardmäßig in einer Tasche vorstehend links angebracht, d.h. auf der linken Seite, wenn man vor dem Sessel steht. Für Linkshänder oder bei Lähmungen der rechten Seite kann der Anschluss auch auf der rechten Seite angebracht werden. Bitte bereits bei Bestellung angeben.



Individuell, ganz nach Ihren Wünschen

Dank Herstellung der VIANDOpflege®-Sessel in Deutschland können wir auf Ihre speziellen Wünsche eingehen. Individuelle Anpassungen für Kleinserien lassen wir gern für Sie fertigen, sprechen Sie uns bei Bedarf einfach unverbindlich an.



Made in Germany – 5 Jahre Garantie

Qualität made in Germany. Da können wir mehr tun als unsere Mitbewerber. Für unsere Privaten Kunden bieten wir zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung weitere 3 Jahre Garantie.



Wohlgefühl und Geborgenheit beginnt beim Design

Funktionalität ist nicht alles, wenn es um ein Möbel geht, in dem ein Mensch sehr viel Zeit verbringt. Wird ein Pflegesessel integraler Bestandteil des Lebens, muss er zum bisherigen Umfeld passen.

Dies steigert Akzeptanz und Wohlgefühl und spiegelt die Würde und den Respekt wieder, mit der wir Pflegebedürftigen begegnen wollen.



Professioneller Vor-Ort-Service

Im Reparaturfall wird der Sessel fachgerecht von geschulten Profis mit Originalteilen repariert. Keine Abholung, kein wochenlanger Verzicht auf den Pflegesessel.

Den professionellen Service eines Meisterbetriebes vor Ort überall in Deutschland ermöglicht POS Polster-Service.

VIANDOpflege®

Hygiene und Bezugsmaterialien



DELIUS
DELIGARD safe & clean Kollektion
Bezugstoff Tiba



DELIUS
DELIGARD safe & clean Kollektion
Bezugstoff Fellini



Höpke
Kunstleder Malaga



Hornschuch Stolzenau
skai Parotega NF





Hygiene ist in allen Bereichen unseres Lebens ein zentrales Thema, macht aber im Gesundheits- und Pflegebereich einen besonders hohen Standard unverzichtbar.

So entspricht der für den professionellen Klinik-Einsatz konzipierte Sessel VIANDOpflege® in allen Aspekten den strengen gesetzlichen Hygiene-Vorgaben.

Alle verwendeten Bezugsmaterialien sind in vollem Umfang blut- und urinbeständig und werden von Desinfektionsmitteln nicht angegriffen. Das im klinischen Bereich bevorzugt eingesetzte Kunstleder Malaga der Firma Höpke Möbelsstoff-Handels GmbH ist mit porenlos glatter Oberfläche genauso antibakteriell, keimdicht und schimmelpilzhemmend wie die Textilien der DELIUS safe & clean Kollektion. Die bei beiden Bezügen produktgegebene Verhinderung von Keimwachstum vergrößert die erforderlichen Desinfektionsintervalle.

Dabei verbinden alle Oberflächen des VIANDOpflege® Hygiene auf Klinikstandard mit wohnlicher, schmeichelnder Optik und Haptik. Eine in jeder Hinsicht gesunde Kombination.

(*)Auf Anfrage auch mit Kunstleder skai Parotega lieferbar.


Quick Facts

- speziell für das Gesundheitswesen entwickelt
- nässe- und schmutzresistent
- wasserundurchlässig
- getestete Desinfektionsbeständigkeit
- Keimwachstum wird verhindert
- senkt Desinfektionsmittel-Verbrauch

Klinisch rein mit Sicherheit

VIANDOpflege®

Bezugsmaterialien und Farbauswahl

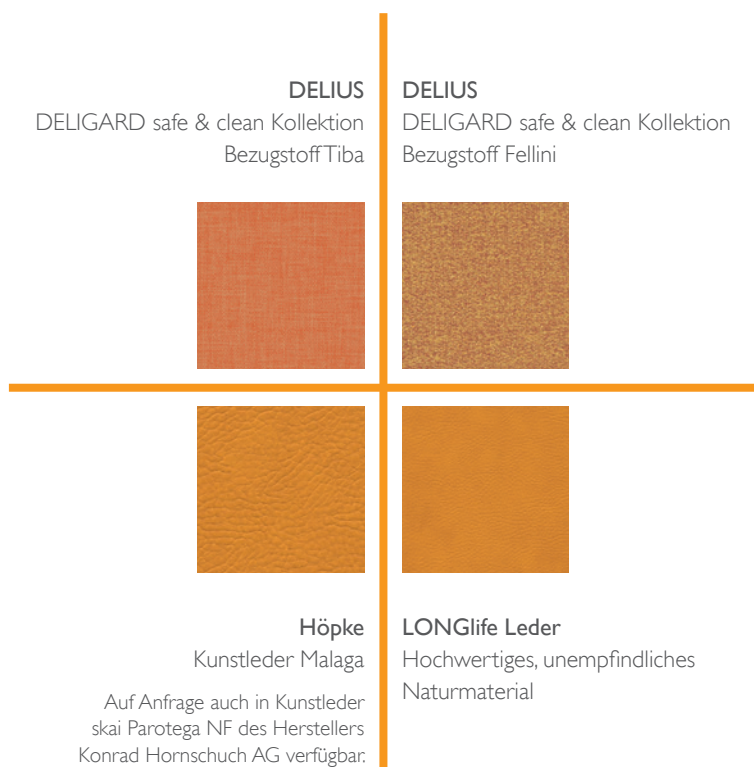




Tiba DELIGARD

Tiba ist ein Flachgewebe mit angenehm glatter Oberfläche und wohnlicher Haptik aus der Kollektion DELIGARD safe & clean des Herstellers DELIUS Textiles GmbH. Das Material ist pflegeleicht und fleckenunempfindlich.



Fellini DELIGARD

Tiba ist ein hochfloriges, samtiges Gewebe für erhöhte Rutschfestigkeit aus der Kollektion DELIGARD safe & clean des Herstellers DELIUS Textiles GmbH. Das Material ist pflegeleicht und fleckenunempfindlich.

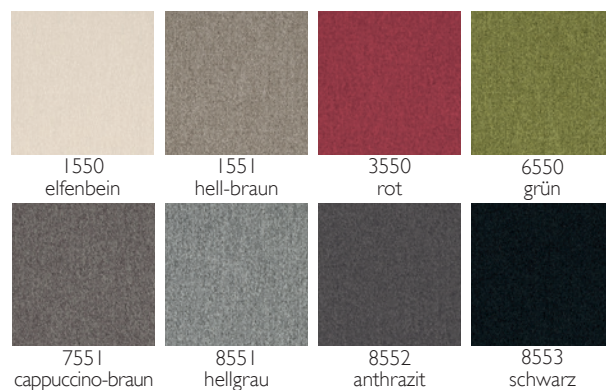

Kunstleder Malaga

Die naturgetreue Optik und Haptik aus der Kollektion Malaga NF des Herstellers Höpke Möbelstoff-Handels GmbH ist von Echtleder kaum zu unterscheiden.

Auf Anfrage auch in Kunstleder skai Parotega NF des Herstellers Konrad Hornschuch AG verfügbar.



LONGlife Leder

Das wertige und unempfindliche Naturmaterial ist atmungsaktiv und nimmt die Körpertemperatur des Sitzenden rasch an. Die Haptik des Leders ist angenehm weich und hautschmeichelnd. Zudem ist es natürlich langlebig und besitzt sehr gute Pflegeeigenschaften.



VIANDOpflege®

Brandschutz



Polsterschäume
schwerentflammbar nach DIN EN 102

Feuer und Flamme



Mit dem VIANDOpflege® sind Sie auch beim Brandschutz auf der sicheren Seite. Seine Bezugsmaterialien, Stoffe, Kunstleder und Schäume erfüllen alle Kriterien für den Objekt- und Pflegebereich in vollem Umfang und sind entsprechend zertifiziert. Sicherheit durch permanente Schwerentflammbarkeit, die es ermöglicht auch bei diesem heißen Thema kühl zu kalkulieren.

Delius-Bezugsstoffe

Unsere textilen Bezüge stammen aus der DELIGARD safe & clean Kollektion von DELIUS, dem deutschen Marktführer für permanent schwer entflammbare Objekttextilien. Der chemische Aufbau ihres Polyestergewebes gewährleistet dauerhafte Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 1021 und BS 5852.

Malaga-Kunstleder

Das für VIANDOpflege® verpolsterte Kunstleder Malaga aus dem Sortiment der Firma Höpke Möbelstoff-Handels GmbH verbindet eine klassische Lederoptik und -haptik in naturgetreuer Narbung.

Quick Facts

- Bezug DELIUS DELIGARD safe & clean schwerentflammbar nach DIN EN 1021 I+2 und BS5852 Crib 5
- Bezug Malaga schwerentflammbar nach DIN EN 1021-I+2 und BS 5852 Source 0+I
- Polsterschäume schwerentflammbar nach DIN EN 102

für Ihre Sicherheit

VIANDOpflege® Qualität



Qualität ist kein Zufall



Auf Qualität und Langlebigkeit des VIANDOpflege® können Sie vertrauen. Entwickelt, gestaltet und produziert in Deutschland, steht er für handwerkliche Präzision, hohen Komfort und Langlebigkeit.

Dabei entspricht jedes Bauteil und Material dem Anspruch, den das Prädikat „Made in Germany“ impliziert – wie etwa die erstklassigen Lithium-Ionen-Akkus, mit denen sich die motorische Verstellung des VIANDOpflege® rund eine Woche lang kabellos bedienen lässt. Auch für die Bezüge verpolstern wir ausschließlich deutsche Qualität der Höpke Möbelstoff-Handels GmbH und der DELIUS GmbH & Co. KG, beide Marktführer in ihren jeweiligen Disziplinen.


Qualität ist kein Zufall. Wir wollen, dass Sie und Ihre Patienten in punkto Pflegemöbel bei uns in besten Händen sind.

Quick Facts

- Made in Germany
- hochwertige Bauteile
- handwerkliche Perfektion
- Bezugsmaterial von Marktführern
- umfangreiche Qualitätssicherung
- Langlebigkeit

— Made in Germany

Maße

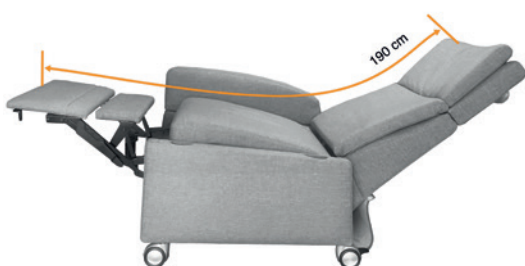



VIANDOpflege® kombiniert ein breites Leistungsportfolio mit einer schmalen Bauform. Das macht ihn hochfunktional. Mit nur 70 cm Breite und geringem Wendekreis lässt er sich selbst in kleinen Räumen mühelos manövrieren und passt als mobiler Rollstuhl auch durch Standardtüren.

Größe demonstriert er dagegen in Ruhelage und Liegeposition, die mit 60 cm extralange Beinauflage garantiert, dass Füße nicht baumeln, sondern zur optimalen Entlastung sicher aufliegen, und die Liegefläche verfügt mit 190 cm über ein ideales Maß zum Entspannen, ohne dass man dafür ins Bett wechseln müsste.

Die 67 cm hohen Armauflagen erleichtern das Aufstehen und Hinsetzen, indem sie ihren Nutzern entscheidende Zentimeter entgegenkommen.

So ist der VIANDOpflege® Maß für Maß durchdacht und gleichermaßen auf menschliche Bedürfnisse wie auf bauliche Gegebenheiten zugeschnitten.

Bitte beachten Sie, dass im Polstermöbelbereich produktionsbedingte Maßabweichungen von +/-2 cm möglich sind. Diese Abweichungen liegen innerhalb der branchenüblichen Toleranzen und stellen keinen Mangel dar.

Quick Facts

- passt durch Standardtüren
- wendig, leicht auf dem Punkt zu manövrieren
- auch mit ausgeklappter Fußauflage
- nur geringfügig über Rollstuhlmaß
- extralange Beinauflage
- in Liegeposition fast Bettmaß
- Armlehnen in Komforthöhe

Passt immer und überall

VIANDOpflege®

Lieferung und Service





Unter der Devise „Und das web wird regional“ bekommen Sie bei uns ein Mehr an Leistung und das von Mensch zu Mensch. Wir begleiten Sie mit Rat und Tat auf dem Weg zu VIANDOpflege®, der exakt für Ihre Verwendungszwecke konfiguriert ist, stellen ihn einsatzbereit bei Ihnen auf und kümmern uns unverzüglich, sollte er irgendwann einmal seinen Dienst versagen.

Lieferung an Ort und Stelle

Wir konfrontieren Sie weder mit Montage-Anleitungen noch mit Verpackungsmüll. Unser Qualitätsprodukt kommt fix und fertig montiert und sofort funktionstüchtig direkt zu Ihnen. Und „direkt“ meint in den fünften Stock statt nur bis zur Bordsteinkante. Ein geschulter Zwei-Mann-Lieferservice unserer hauseigenen Spedition platziert den Pflegesessel genau dort, wo er gebraucht wird und nimmt die schützende Folienverpackung gleich wieder mit.

Reparatur Soforthilfe

VIANDOpflege® bleibt für Sie jederzeit einsatzbereit. Sollte es einmal zu einer Beschädigung oder einem Funktionsausfall kommen, regeln wir das schnell und zuverlässig an Ort und Stelle. Dort wird der Sessel von den Profis eines Meisterbetriebes mit Originalteilen repariert. Mehrwert den wir in Kooperation mit POS, dem deutschlandweit agierenden Full-Service-Spezialisten für fachgerechte Vor-Ort-Reparatur von Möbeln realisieren. Und der Ihnen Abholung und Verzicht auf den Pflegesessel erspart.

Quick Facts

- endmontiert und sofort einsatzbereit

Innerhalb Deutschlands

- versandkostenfreie Lieferung durch geschultes Team der hauseigenen Spedition
- Platzierung direkt am Wunschort hinter der I. verschlossenen Tür
- Full-Service-Reparatur vor Ort
- Ausland und Deutsche Inseln
Preis auf Anfrage.

Das nehmen wir persönlich

VIANDOpflege® Ökologie





VIANDOpflege® tut nicht nur Ihren Patienten sondern auch der Umwelt gut. Unser Pflegesessel ist mit durchweg hochwertigen Materialien und Qualität Made in Germany bestens ausgestattet für ein langes Produktleben, entspricht in jeder Hinsicht den strengen deutschen und europäischen Richtlinien und kommt dazu mit minimaler Verpackung und kurzen Transportwegen aus. Durchweg positive Bilanz für Nutzer wie für das Ökosystem.

Schadstoffminimierung

In Verantwortung für Mensch und Umwelt verwenden wir ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Produkte. Dafür kooperieren wir mit Partnern, die in Deutschland produzieren und den hiesigen Richtlinien zu Imprägnierung, Färbung und Brandschutzbehandlung verpflichtet sind. Darüber hinaus verzichten DELIUS und Höpke freiwillig auf erlaubte, aber nicht für alle Menschen problemfreie Substanzen wie Formaldehyd oder das Flammschutzmittel Decabromdiphenylether.

Kurze Transportwege

Der VIANDOpflege® wird in Deutschland gefertigt und von unserer hauseigenen Spedition europaweit ausgeliefert. Weder Bauteile noch das fertige Möbel sind auf den Transport per Flugzeug angewiesen und ersparen der Umwelt somit unnötige CO₂-Belastung.

Kein Verpackungsmüll

Fachleute liefern das fertig montierte Möbel direkt an den Einsatzort. So fallen keine Kartonagen oder Euro-Paletten als unerwünschtes Beiwerk an. Der Polstersessel wird lediglich mit einer Folie vor Verschmutzung auf dem Transportweg geschützt – und die können Sie unserem Team gern wieder mitgeben.

Quick Facts

- Verzicht auf AZO-Farben
- kein Einsatz von Decabromdiphenylether (DecaBDE)
- Formaldehyd frei
- kein Einsatz von Polychlorierten Biphenylen (PCB)
- FCKW frei
- umweltschonende Verpackung

Mit gutem Gewissen

VIANDOpflege®

Warum, wer, wo?



Transparent hinter



Von wem?

VIANDOpflege® ist eine Entwicklung der KRANICHconcept GmbH in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fachgesellschaft für Aktivierend-therapeutische Pflege e.V. (DGATP) und den Hamburger Pflege-Instruktoren der BIKA® e.V.

Björn Kranich war bei der eigenen, biografisch motivierten Suche nach einem universal einsetzbaren Pflegesessel erfolglos. Daraufhin beschloss er, als Einrichtungsexperte über Jahrzehnte im Hochwertbereich tätig, diese Lücke im Care-Bereich mit einem innovativen Qualitätsmöbel zu schließen, das Design mit Flexibilität und einem Maximum an Funktion verbindet.

VIANDOpflege® ist eine patentrechtlich geschützte Marke der KRANICHconcept GmbH und zählt gemeinsam mit weiteren Produkten zum fachspezifischen Segment KRANICHcare des Familienunternehmens aus Hamburg.

Warum?

„Beim VIANDOpflege®-Sessel wurde sehr vorausschauend gedacht, und so bietet er nicht nur kranken und alten Menschen viel Komfort, sondern ist auch für pflegende Angehörige oder Pflegepersonal dank der hohen Funktionalität eine enorme Entlastung.“

*Dirk W. Rosenkranz, Vorstandsvorsitzender
Deutsche Muskelschwundhilfe und Betroffener*

Quick Facts

Wer?

Beispiele für Krankheitsbilder, bei denen VIANDOpflege® unterstützt

- Parkinson
- Muskelschwäche
- Herzinfarkte
- Lähmungen
- ALS
- Alzheimer / Demenz
- Unfälle

Wo?

Beispiele für Einsatzbereiche des VIANDOpflege®

- Geriatrien
- Früh-Reha-Kliniken
- Onkologien
- Palliativ-Stationen
- Diakonien
- Tageskliniken
- Senioren-Residenzen
- Betreutes Wohnen
- Stroke-Units
- Geburtskliniken
- Augenkliniken

helfen beim helfen



KRANICHconcept GmbH
Holtenklinker Str. 11
21029 Hamburg
t +49 (0)40 2282 127 20
info@kranich-care.de
www.kranich-care.de
<https://kranich-care.de/pflegesessel/>

VIANDOpflege® Broschüre 2025-4